



Mepiform®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

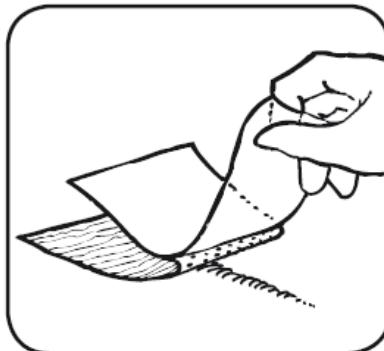

STERILE EO

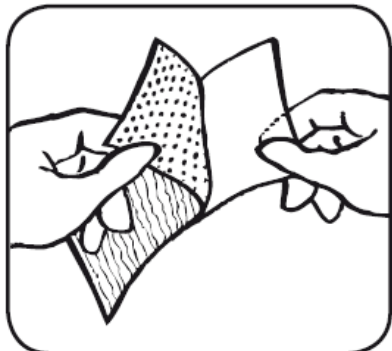

Za jednokratnu upotrebu



Ne koristite ukoliko je unutrašnje pakovanje oštećeno

Mepiform®

Meki samolepljivi silikonski flaster za ožiljke

Opis proizvoda:

Mepiform je tanak, diskretan i fleksibilan flaster koji se sastoji od poliuretanskog netkanog laminata prekrivenog mekim silikonskim gelom.

Safetac tehnologija:

Safetac je patentirana tehnologija mekog adhezivnog silikona.

Na koži, Safetac prijanja lagano ali sigurno bez skidanja epiderma ili bola pri uklanjanju.

Namena:

Mepiform se koristi za tretman kako starih tako i novih hipertrofičnih i keloidnih ožiljaka. Može se takođe upotrebiti profilaktički kod zatvorenih rana kao prevencija stvaranju hipertrofičnih i keloidnih ožiljaka.

Uputstvo za upotrebu:

Aplikacija:

1. Otvoriti pakovanje i izvaditi flaster.

2. U slučaju potrebe, može se seći na željenu veličinu ostavljajući da pokriva zdravu kožu minimum 1 cm.
3. Osigurati da je područje aplikacije suvo. Kad se upotrebljava sa mastima i kremama, osigurati da flaster pokriva više od namazanog područja.
4. Ukloniti zaštitni film i staviti Mepiform preko ožiljka/rane. Izbegavati istežanje flastera kad se aplikuje preko zglobova.

Zamena i uklanjanje

1. Optimalno vreme nošenja Mepiforma je 24 sata dnevno. Skinite flaster jednom dnevno radi inspekcije i pranja kože. Flaster se zatim ponovo može staviti.
2. U normalnim okolnostima Mepiform menjati na 3-7 dana ili kad prijanjajuće osobine flastera više nisu dovoljno izražene.
3. Mepiform je vodootporan i može se nositi tokom tuširanja i kupanja.

Predostrožnost:

U slučaju pojave maceracije ili osipa, ukloniti flaster i dozvoliti koži da se oporavi dok simptomi ne nestanu, zatim nastaviti tretman postepeno produžavajući vreme nošenja. Ako se simptomi nastave prekinuti upotrebu i konsultovati lekara za savet.

Sterilnost i čuvanje: Garantovana sterilnost ukoliko je unutrašnje pakovanje neoštećeno ili neotvoreno. Ne restertilisati.

Mepiform i Safetac su registrovane robne marke Mölnlycke Health Care AB.

Proizvođač: Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Švedska